


Lumiàge Frax

FRAKCYJNY RESURFACING SKÓRY


1 MHz / 4 MHz / 8 MHz

RF + mikronakłuwanie + podciśnienie
+ światło niebieskie 415 nm

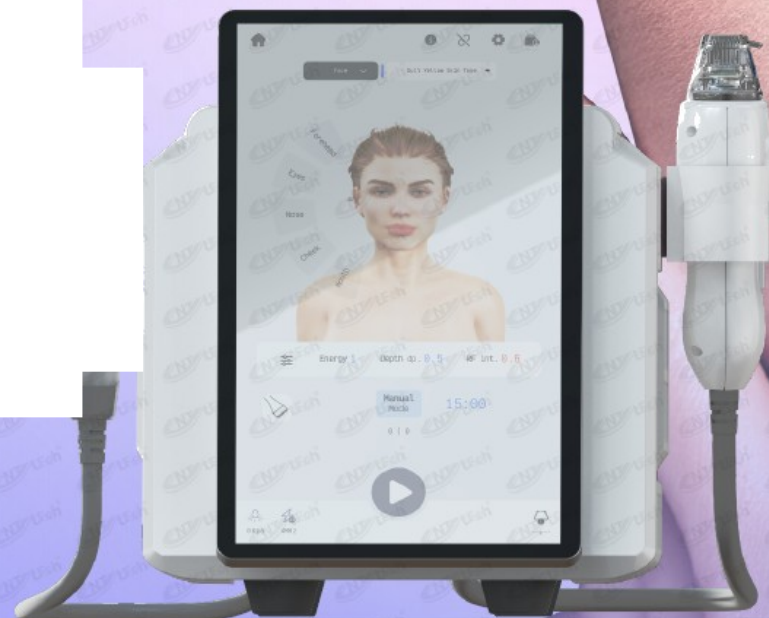


Zasada działania


Frakcyjny resurfacing to małoinwazyjna technologia odmładzania skóry. Sterylne mikroigły tworzą kontrolowane mikrourazy, które pobudzają naturalną regenerację oraz produkcję kolagenu i elastyny.

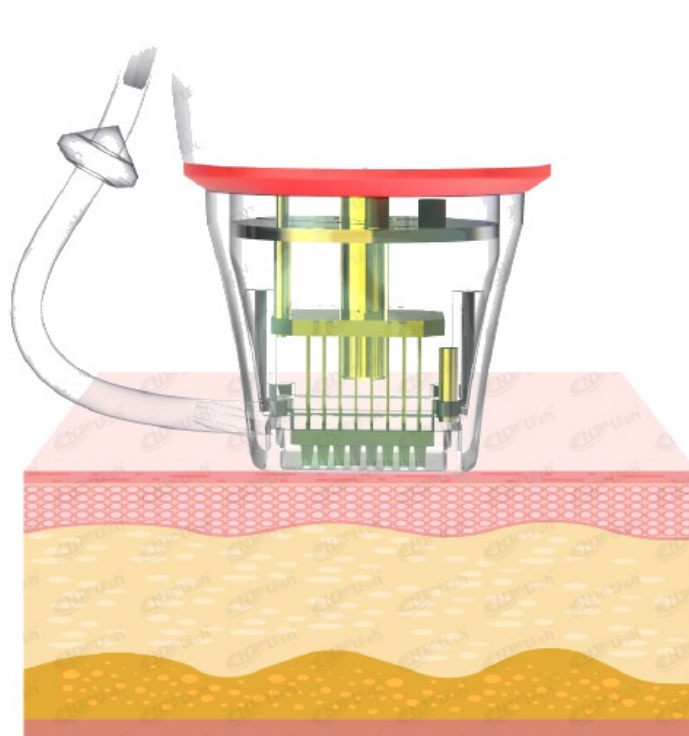

Kontakt ze skórą

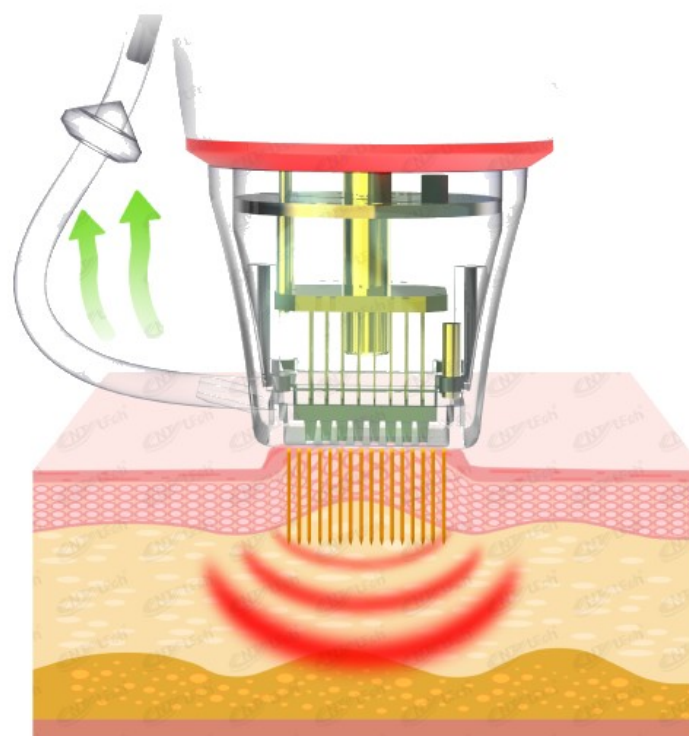

Podciśnienie stabilizuje skórę, a igły dostarczają energię RF w głąb tkanki.

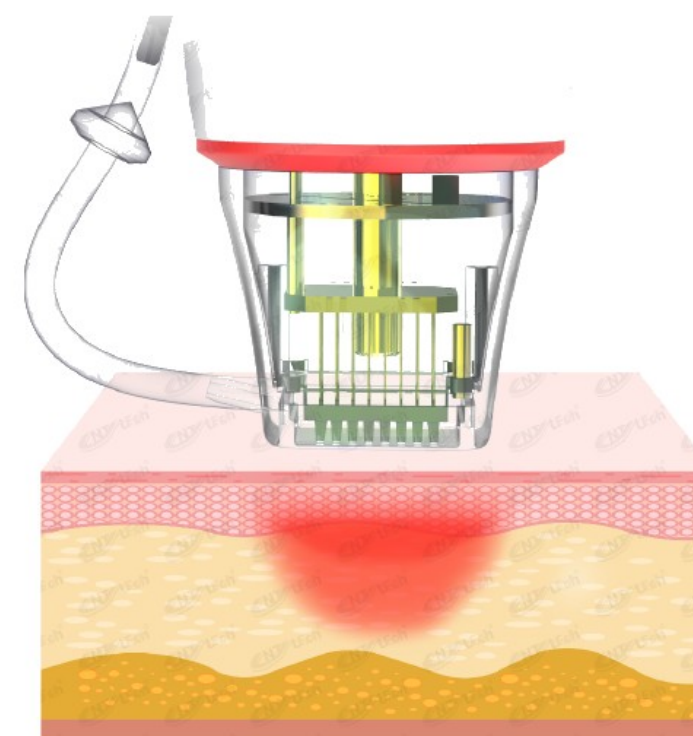

Po zabiegu skóra może być lekko zaczerwieniona.

Prezentacja urządzenia



Prezentacja urządzenia

RF mikroigłowa + młotek zimno/ciepło + analizator skóry

3 końcówki



Końcówka mikroigłowa RF

Ujędźnia i napina skórę, zmniejsza widoczność porów.




Młotek zimno / ciepło

Koi skórę, pomaga zmniejszyć ból, obrzęk i zaczerwienienie.



Analizator skóry

Wizualizacja rezultatów i kondycji skóry.

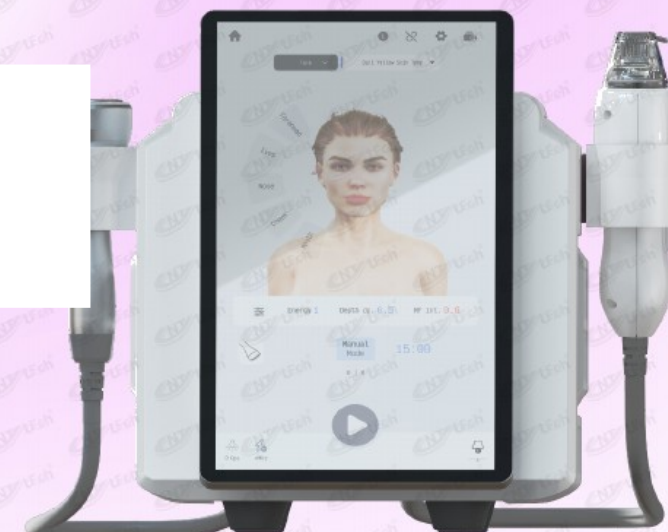


Ulepszona końcówka mikroigłowa

Ultracienka mikroigła

- Minimalna średnica: 0,1 mm
- Mniej punktów krwawienia i mniejszy dyskomfort
- Niższe ryzyko infekcji przy prawidłowej pielęgnacji

RF + mikronakłuwanie

Połączenie mikronakłuwania z energią RF pobudza kolagen i wspiera poprawę jakości skóry.

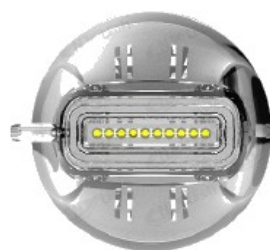

10 igieł

Precyzyjne obszary twarzy



36 igieł

Kompleksowe zabiegi twarzy



64 igły

Większe obszary skóry





Nano

Zabiegi powierzchniowe

Zalety urządzenia


Adsorpcja podciśnieniowa

Podciśnienie pomaga utrzymać bardziej równomierną głębokość penetracji mikroigieł niż tradycyjne nakłuwanie. Według materiału producenta poprawa efektów klinicznych może przekraczać 20% na podstawie opinii użytkowników.

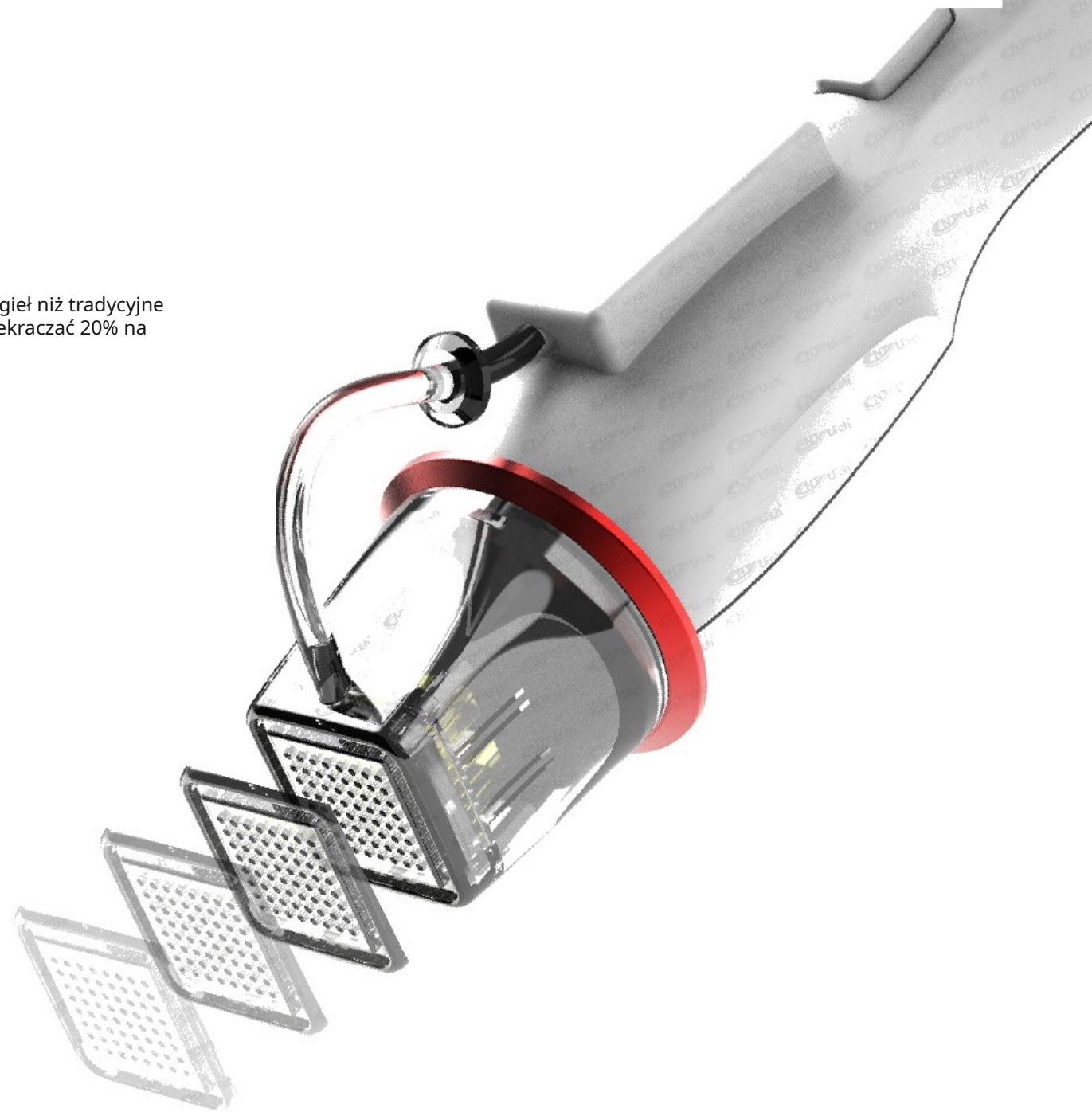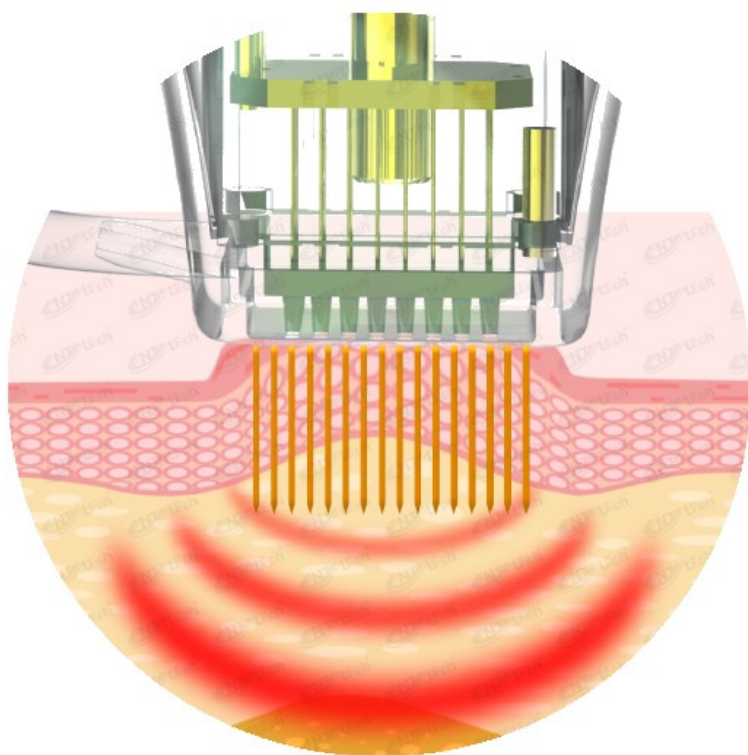



System ochrony emisji RF

Brak podciśnienia = brak emisji energii RF. Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa podczas zabiegu.

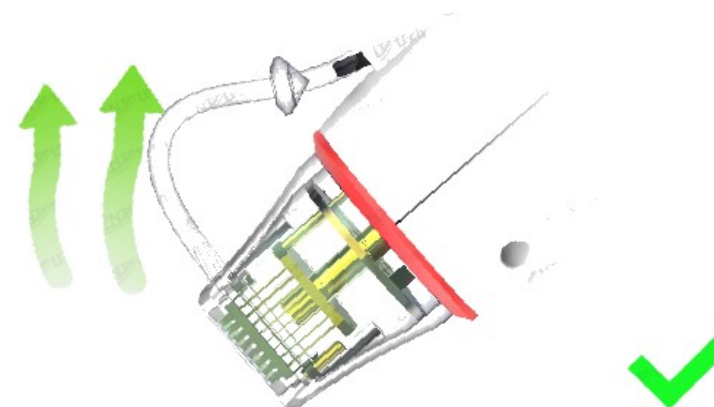

Bez podciśnienia

Wymaga ręcznego docisku. Głębokość penetracji może być mniej równomierna.

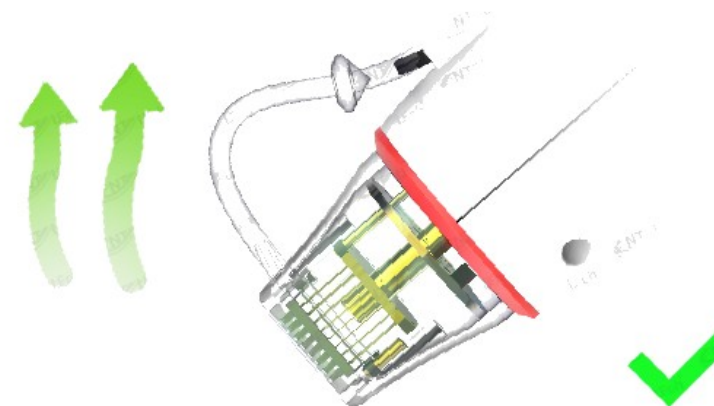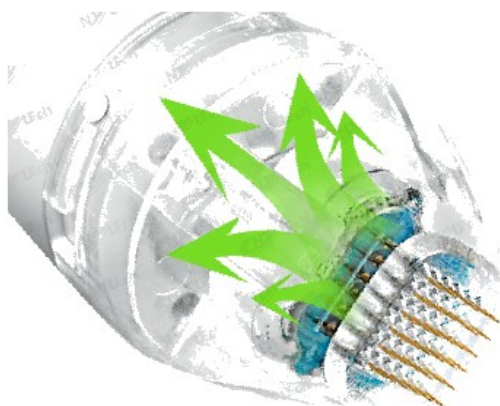

Wewnętrzny układ podciśnienia - większa podatność na zanieczyszczenia.


Zewnętrzny filtr podciśnienia - higieniczny i bezpieczny.

Wieloczęstotliwościowa RF


415 nm

światło niebieskie

Według materiału producenta: działanie przeciwzapalne i antybakteryjne.

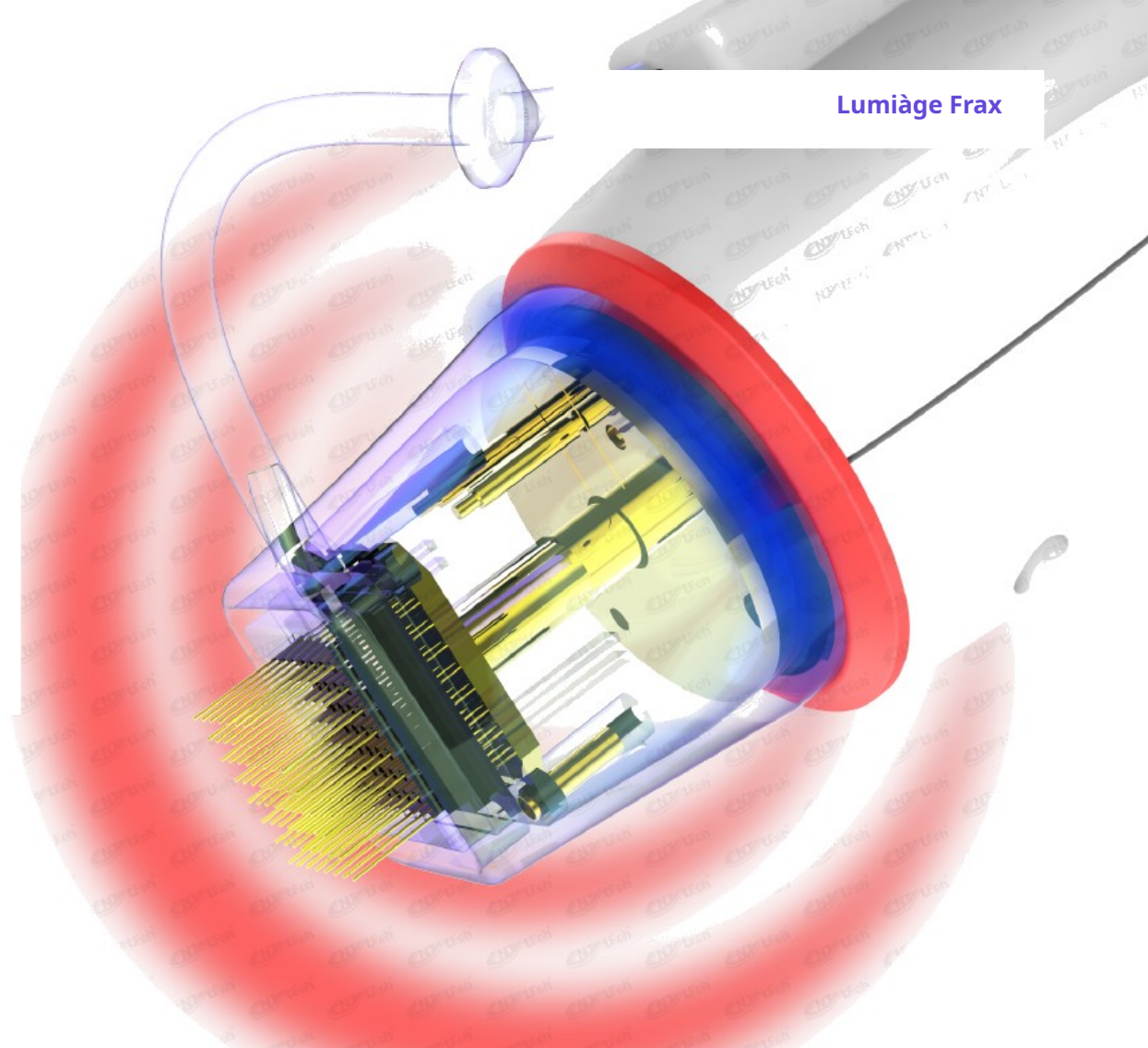

Lumiàge Frax

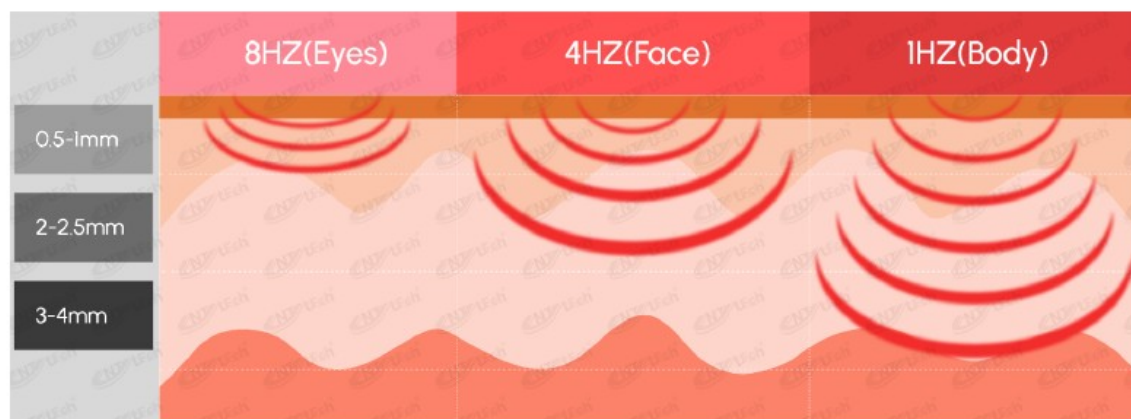

1 MHz / 4 MHz / 8 MHz

Trzy częstotliwości RF do różnych obszarów zabiegowych.

8 MHz - okolice oczu • 4 MHz - twarz • 1 MHz - ciało

Bezpieczne, higieniczne i sterylne opakowanie igieł

Igły są pakowane indywidualnie, oznakowane i sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Deklarowana skuteczność sterylizacji: 99,99%.




Młotek zimno / ciepło

Szybkie chłodzenie

do 0°C w około 30 sekund



0-5°C

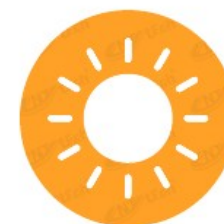

35-50°C

Koi skórę, pomaga zmniejszyć ból, obrzęk i zaczerwienienie oraz obkurczać pory.

Analizator skóry

Trzy zakresy detekcji

UV • światło turbinowe • światło białe

UV: ocena możliwych infekcji skóry.

Światło turbinowe: ocena naczyń, pigmentacji i stanów zapalnych.

Światło białe: ocena porów, zmarszczek, odwodnienia i przetłuszczania.



Inteligentny system Android

Aktualizacje OTA

System może być aktualizowany online.

Automatyczne rozpoznawanie


Rozpoznaje typ igły i obszar oraz dobiera odpowiednią częstotliwość.

Analiza kondycji skóry

Wbudowana funkcja wspierająca ocenę skóry.

Animowane prowadzenie ANG™

Ułatwia obsługę urządzenia początkującym operatorom.

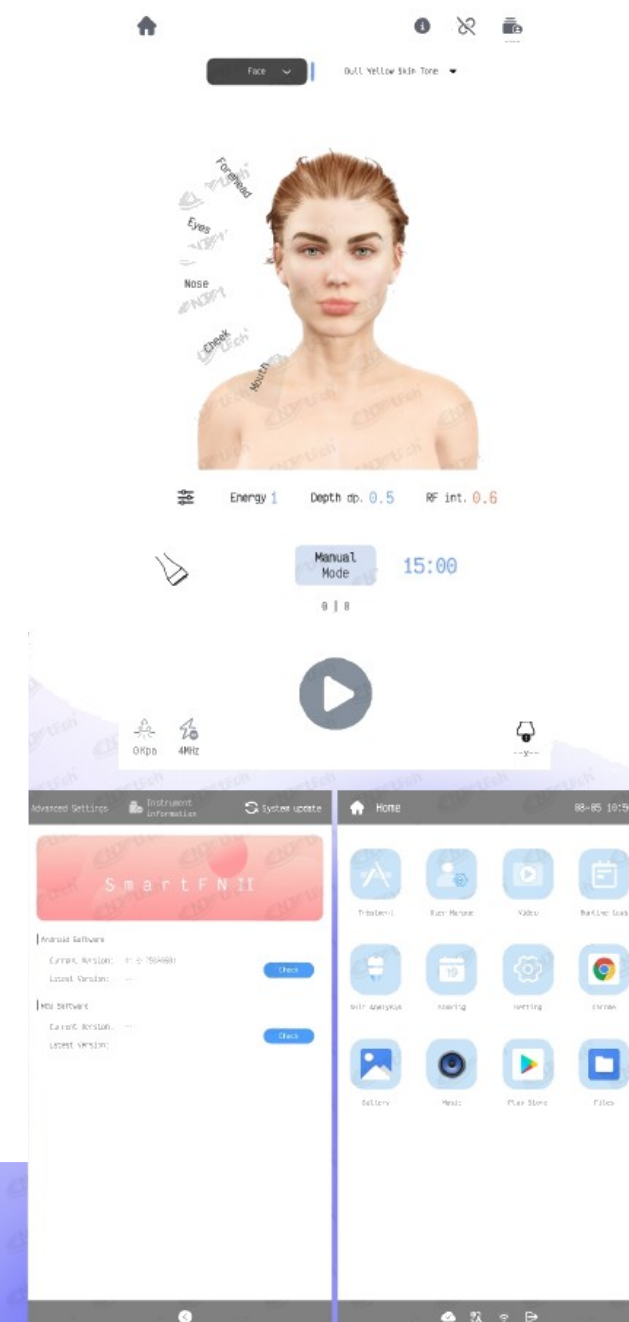

Zastosowania



Specyfikacja techniczna

Lumiàge Frax

Ekran	13,3 cala - w pełni laminowany
Częstotliwość RF	1 MHz / 4 MHz / 8 MHz
Moc	100 W
Napięcie wejściowe	110 V / 220 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz / 60 Hz
Podciśnienie maks.	70 kPa
Ciśnienie robocze	25-70 kPa, regulowane
Średnica mikroigły	0,1 mm
Zakres wysuwu igły	0,5-4,0 mm
Kombinacje igieł	10×1 / 6×6 / 8×8 / Nano
Wymiary urządzenia	513 × 282 × 317 mm
Wymiary opakowania	660 × 500 × 510 mm
Waga urządzenia	20 kg
Waga z opakowaniem	26 kg

